

DESCO WIPES

La soluzione perfetta per una rapida disinfezione



Descrizione del prodotto

Panno da impregnare con disinfettanti, indicato per una rapida pulizia e disinfezione delle superfici e dei dispositivi medici. I panni sono fatti con materiale di alta qualità (poliestere), privo di fibre non tessute.

Desco Wipes DT grazie alla struttura del panno, garantisce una perfetta pulizia ed è indicato per la disinfezione di tutte le superfici. **Desco Wipes DT** può essere usato con tutti i disinfettanti disponibili sul mercato.

Con il sistema **Desco Wipes DT** si garantisce sempre lo stesso livello di disinfezione: ogni panno viene imbevuto in modo omogeneo con la stessa quantità di disinfettante in modo tale da garantire una disinfezione ottimale.

Si utilizza per la disinfezione delle superfici in tutti i reparti delle strutture sanitarie, come Ospedali, Case di Cura, Ambulatori.

Ogni panno viene utilizzato una sola volta, per evitare infezioni crociate da una superficie ad un'altra.

Descrizione	Confezionamento	Codice Prodotto
Ricarica – 50 salviette	3 rotoli	00-915-RD5003
Ricarica – 100 salviette	6 rotoli	00-915-RD10006
Secchiello – 4,5lt	6 secchielli	00-915-SD002

DESCO WIPES

La soluzione perfetta per una rapida disinfezione

Istruzioni d'uso



1

Aprirete il coperchio del secchiello. Per la vostra sicurezza raccomandiamo di indossare i guanti.



6

Chiudete il coperchietto di sicurezza prestando attenzione che questo sia perfettamente chiuso e che non pizzichi alcun panno al fine di garantire una perfetta tenuta.



2

Togliete il rotolo di ricambio dalla sua confezione ed inseritelo nel secchiello.



7

Il vostro dispenser sarà pronto per l'uso quando tutti i panni contenuti saranno imbevuti di disinfettante. Normalmente sono necessari 30'



3

A seconda del grado di saturazione desiderato, preparate 2 litri di soluzione disinfettante seguendo le istruzioni del produttore e versatela lentamente nel secchiello.



8

Incollate l'etichetta su cui scriverete tutti quei dati che riterrete opportuni (nome del disinfettante, data di attivazione e di scadenza, ecc.)



4

Fate passare in primo panno partendo dal centro del rotolo nel foro a lamelle del coperchio.



5

Chiudete il coperchio esercitando una discreta pressione.

RIUTILIZZO DEL SECCHIELLO

Il secchiello è riutilizzabile.

Prima del suo utilizzo si raccomanda di pulirlo manualmente.

La pulizia del secchiello può avvenire con i disinfettanti presenti nel confezionamento del panno.

Le etichette dovranno essere sostituite ogni volta che si provvede a ricaricare il sistema di nuovo disinfettante.