



Dispositivo medico **pluriuso** progettato per fissare in modo **semplice, sicuro, e versatile** le linee ematiche durante il trattamento dialitico

### Caratteristiche principali:

---



**Riduce il rischio**  
di trazione e  
dislocamento  
dell'ago (VND) [1]



Posizionamento  
**stabile, standard**  
ed ordinato delle  
linee ematiche



**Facile fissaggio**  
ad indumenti e/o  
lenzuola  
migliorando il  
confort

Clip per il fissaggio in sicurezza delle linee ematiche durante l'emodialisi, con una **testina rotante a 360°** e doppio alloggiamento.

Si fissa facilmente ai vestiti o alle lenzuola.



## Caratteristiche:

- Dispositivo medico pluriuso
- Classe I non sterile
- Latex free
- Diametro linee compatibili: 6-8 mm
- Codice prodotto: 00001
- CND V9099
- RMD 2461396
- Scatola da 50 pezzi (5 sacchetti trasparenti da 10 pz)




## Componenti:

- Testa morbida rotante in polipropilene (PP)
- Pinza rigida di fissaggio in poliossimetilene (POM)


## Applicazione rapida in 4 passaggi:

### 1 Posizionamento

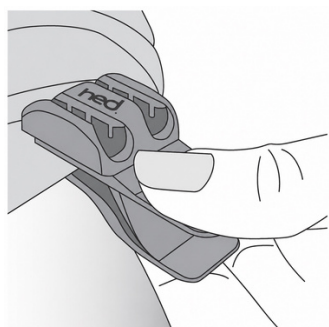


Posizionare HEDclip sul tessuto o lenzuolo, nel punto desiderato

### 2 Regolazione

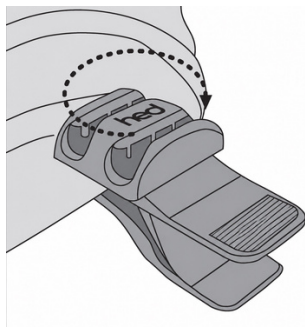


Ruotare la testina superiore fino all'angolazione desiderata (fino a 360°)

### 3 Inserimento

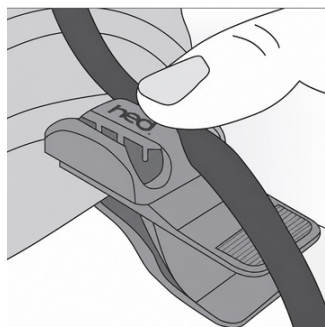

Inserire le linee ematiche negli appositi alloggiamenti dedicati

### 4 Fissaggio

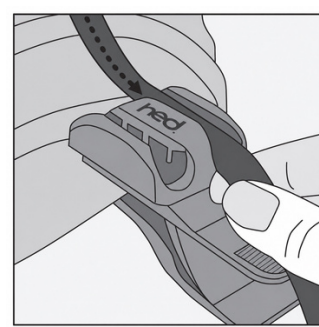

Regolare la posizione dei tubi per un fissaggio stabile e sicuro

