

Loftex –Wipes

Panni in PET (Poliestere) per la disinfezione di tutte le superfici.



Panno Loftex wipes da impregnare con disinfettanti per una rapida e facile pulizia e disinfezione delle superfici.

Problema - una adeguata disinfezione delle superfici è il nodo cruciale per affrontare il coronavirus. La disinfezione tramite nebulizzatori non garantisce però un'asetticità uniforme sulle superfici trattate. Infatti la quantità di disinfettante dipende da ogni singolo operatore e dal numero degli "spruzzi" usati per pulire le superfici. **Il risultato quindi non è una disinfezione omogenea.**

Soluzione - con il sistema Loftex Wipes si garantisce sempre lo stesso livello di disinfezione: **ogni panno viene imbevuto in modo omogeneo** con la stessa quantità di disinfettante in modo tale da assicurare sempre un ottimo livello di disinfezione.

Ogni panno viene utilizzato una sola volta per evitare infezioni crociate da una superficie ad un'altra. **Loftex Wipes può essere usato con tutti i disinfettanti disponibili sul mercato.**

Descrizione del prodotto

Loftex Wipes è indicato per la disinfezione di tutte le superfici e può essere utilizzato in tutti i reparti delle strutture sanitarie come Ospedali, Case di Cura e Ambulatori.

Il sistema consiste in un dispenser nel cui interno è inserito un rotolo in microfibre (100 % PET (Polyester 50 g/m²) costituito da 50 o 90 strappi. Il sistema è molto pratico: si riempie il secchiello con 1,5/2 litri di disinfettante già diluito e il panno, pretagliato, rimane all'interno e sempre pronto all'uso. È sufficiente solo estrarlo dal secchiello.

I panni sono forniti asciutti, costituiti da fibre di alta qualità non tessute. I panni vengono estratti da un apposito dispenser richiudibile che permette di proteggere il prodotto dalla contaminazione e dall'evaporazione.

Loftex –Wipes


Panni in PET (Poliestere) per la disinfezione di tutte le superfici.

Loftex-Wipes può essere usato con tutti i disinfettanti commercialmente disponibili sul mercato. Dopo essere stati imbevuti con il disinfettante, i panni possono essere utilizzati fino a 28 giorni, secondo le proprietà del disinfettante in uso.

Il dispenser, in Polipropilene, può essere pulito e trattato:

- Termicamente fino a 100°C
- Termo-chimicamente fino a 70°C per un minimo tempo di esposizione di 1/5 min

È presente un'etichetta da attaccare nell'apposito spazio con relativi dettagli (data di preparazione, concentrazione ecc) (fig.2).

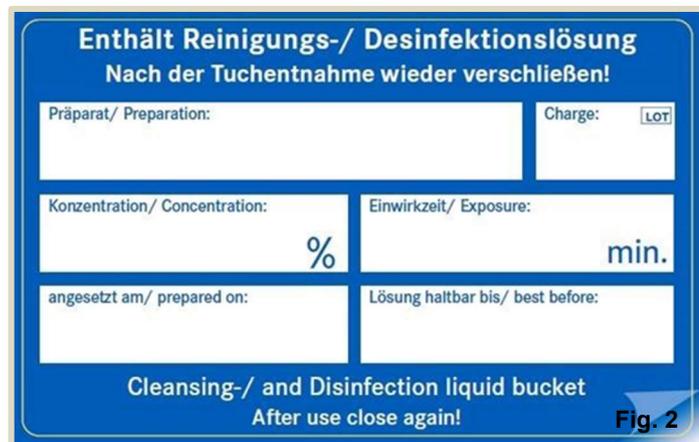

Istruzioni d'uso

Preparare 1,5/2 litri di soluzione disinfettante seguendo le istruzioni del produttore e versatela lentamente nel secchiello. Fate passare il primo panno partendo dal centro del rotolo nel foro a lamelle del coperchio (fig.1). Chiudere il coperchio esterno esercitando una leggera pressione e la chiusura centrale del foro a lamelle in modo che il dispenser sia perfettamente chiuso.

Il dispenser sarà pronto per l'utilizzo quando tutti i panni saranno imbevuti di disinfettante: circa 30 minuti.

DESCRIZIONE	CODICE	MISURA
Loftex wipes: 8 rotoli da 90 panni	1240090	29 x 32 cm
Loftex wipes: 10 rotoli da 50 panni	1240050	29 x 32 cm
Secchielli: 6 pezzi da 5lt	9010485	