

T HEDclip

DESTINAZIONE D'USO

HEDclip è stato creato unicamente per aiutare lo staff clinico a fissare le linee ematiche (diametro esterno 6-6,8 mm) agli indumenti del paziente durante un trattamento dialitico. HEDclip si fissa facilmente all'indumento o alla cintura ed assicura un fissaggio delle linee igienico e più sicuro. Fissare le linee ematiche agli indumenti del paziente riduce il rischio di distacco meccanico dei dispositivi "a puntura" a causa dei movimenti del paziente durante la seduta di emodialisi.

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Come fissare HEDclip

Per fissare HEDclip agli indumenti nel modo migliore, trovare un posto appropriato sui vestiti del paziente o alla cintura (la cintura può essere utilizzata per un accesso vascolare con catetere venoso centrale). Poi, aprirla mediante l'applicazione di pressione sulla parte inferiore ed infilare tra i dentini il tessuto possibile. In caso di indumenti leggeri, è importante prendere una cucitura o piegare il tessuto prima del fissaggio del prodotto.

2. Come posizionare la parte superiore

Fissare HEDclip agli indumenti del paziente in modo che le guide dei tubi si trovino nella stessa direzione degli aghi fistola. In questo modo la parte inferiore sarà posizionata nel punto preferito, pur mantenendo la giusta angolazione di HEDclip in relazione agli aghi / fistole.

3. Come montare le linee

Una volta fissato HEDclip nella posizione corretta, montare le linee nei supporti. Far scorrere i tubi dentro alle guide applicando una pressione su un tubo alla volta con un movimento scorrevole.

4. Come regolare le linee

Se è necessario aumentare la lunghezza tra HEDclip ed i dispositivi "a puntura" per consentire maggior movimento da parte del paziente, regolare i tubi semplicemente tirando lentamente nella direzione desiderata. Se necessario, regolare nuovamente la direzione delle guide delle linee. Le lamelle all'interno delle guide limitano lo spostamento dei tubi di sangue che può essere causato da una forza eccessiva applicata agli aghi / fistole.

5. Come rimuovere HEDclip

Rimuovere una linea alla volta facendo scorrere il tubo fuori dalla guida tirando leggermente. Ripetete questa operazione con l'altro tubo. HEDclip può quindi essere rimosso dagli indumenti del paziente o dalla cintura. Applicare una pressione sulla parte inferiore per aprirlo e rimuoverlo dalla parte di indumento tenuta tra i dentini.

PRECAUZIONI

Pulizia:

HEDclip non necessita di sterilizzazione e può essere pulito con soluzione acquosa o idro-alcolica con detergente (ad esempio biossido di cloro, acido peracetico, glutaraldeide, cloruro di benzalconio). Tuttavia, se viene a contatto con sangue o si sporca, può essere pulita a temperature da 100 °C fino a 130 °C. (NB! Una pulizia frequente ad alte temperature riduce la durata del prodotto.)

Movimentazione e stoccaggio:

Assicurarsi che HEDclip non sia esposto alla luce diretta del sole, quando non in uso. Questo potrebbe ridurre l'aspettativa di vita di HEDclip e diminuire la sua durata. Assicurarsi che HEDclip non venga tenuta in una posizione meccanicamente stressante (cioè aperta) quando non in uso. Questo diminuirà la sua presa con conseguente riduzione temporanea o permanente della sua capacità di fissarsi agli indumenti.

ALTRI SIMBOLI UTILIZZATI SULL'ETICHETTA DEL PRODOTTO.



Consultare le istruzioni per l'uso



Fabbricante



Marchatura CE



Codice a catalogo



Data di fabbricazione



Data di scadenza

GARANZIA E LIMITI DI RESPONSABILITÀ

- Il fabbricante, Health Equipment Denmark, garantisce che HEDclip è stato fabbricato secondo le specifiche e nel rispetto delle norme di buona fabbricazione, di altri standard applicabili nonché dei requisiti normativi.
- Il fabbricante garantisce che i propri prodotti sono esenti da difetti di materiale e di fabbricazione per un periodo di 3 anni dalla data di acquisto. Questa garanzia non si applica alla normale usura.
- Il fabbricante non può essere tenuto responsabile di un eventuale uso errato, uso improprio, mancato rispetto delle avvertenze e le istruzioni, eventuali danni derivanti da eventi successivi alla consegna da parte del fabbricante di HEDclip e mancata o errata ispezione del prodotto prima dell'uso al fine di assicurarne le buone condizioni.
- Il fabbricante è Health Equipment Denmark, Skt. Anna Gade 45A, 3. th, 8000 Aarhus C, Danimarca.

DISEGNO DI HEDCLIP



Health Equipment Denmark
Skt. Anna Gade 45A, 3. th
8000 Aarhus C
Denmark