


SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

NOME COMMERCIALE	INFU-SURG: premisacca per infusione di liquidi	
		
CODICE	ETH 4005H (con gancio): per sacche da 500 cc ETH 4010H (con gancio): per sacche da 1000 cc ETH 4030 (senza gancio): per sacche da 3000 cc	
PRODUTTORE	ETHOX MEDICAL (GRUPPO SUNMED LLC) - U.S.A.	
USO	Premisacca disposable monopaziente (semi-riutilizzabile, ma non riparabile), per infusione di liquidi a pressione, con accurato manometro di lettura infrangibile (0-300mmHg) con valvola di sicurezza per prevenire la sovra-pressione, larga pompetta ovale per una rapida insufflazione manuale della sacca per la compensazione della pressione del liquido e relativo rubinetto con attacco per eventuale compensatore di pressione esterno e posizione di chiusura. Al fine del controllo delle infezioni si consiglia un uso monopaziente. Il gancio, ove disponibile (sacche da 500 e 1000cc) permette una sostituzione della sacca più semplice senza dover rimuovere il premisacca Infu-Surg dallo stativo. Mantiene la sacca del fluido nella corretta posizione durante l'uso.	
CARATTERISTICHE	Corpo del premisacca composto da due parti in nylon rinforzate da un rivestimento in uretano, una bianca con un area per scrivere le informazioni sul paziente, l'altra costituita da una rete trasparente per il controllo visivo dei liquidi; manometro di lettura della pressione con tacche di diverso colore per l'indicazione della pressione (0-300mmHg) con valvola di sicurezza per prevenire la sovra-pressione (scarico della pressione a partire dai 330mmHg); rubinetto a 3 vie con attacchi luer-lock in PVC rigido medical grade e pompetta in PVC con sfiato per recupero aria a valvola; tubo di collegamento dal rubinetto alla valvola di sicurezza, al manometro e al premisacca, in PVC morbido medical grade. Fascetta per aggancio a stativo. LATEX FREE.	
CONFEZIONE	ETH 4005H: Confezione da 5 unità singolarmente imbustate. ETH 4010H: Confezione da 5 unità singolarmente imbustate. ETH 4030: Confezione da 5 unità singolarmente imbustate.	
IN POSSESSO MARCHIO CE No. CE 01659- CLASSE IIa CODICE CND: A0880 N. REPERTORIO: 124600/R		
STERILIZZAZIONE	TIPO DURATA	NON STERILI
Distribuito da: IN.CAS. s.r.l. Via Staffali 40A, 37062 Dossobuono di Villafranca (VR) - Tel. 045/8601267 - Fax 045/8601090 E-mail: info@incasmed.com - Sito Web: https://www.incasmed.com		