
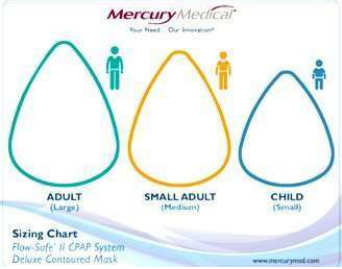


**INCAS**Medical Safety
Innovation**SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO**

NOME COMMERCIALE	SISTEMA CPAP FLOW-SAFE II Plus BiLevel	
CODICI	 <p>10-57400 maschera mis. Adulto Grande (Large) 10-57401 maschera mis. Adulto Piccolo (Medium) 10-57402 maschera mis. Pediatrica (Small)</p> <p>Sistema Flow-Safe II + con commutatore CPAP/BILEVEL, maschera profilata (ove prevista), porta rotante dritta e fissaggio per la testa. Ogni sistema è inoltre provvisto di manometro, valvola di sicurezza, tubo ossigeno (lunghezza 2 m ca.).</p> 	
PRODUTTORE	MERCURY MEDICAL® - U.S.A.	
USO	<p>Il sistema Flow-Safe II Plus della Mercury Medical è concepito per fornire una pressione CPAP o BILEVEL (IPAP/EPAP) a pazienti che respirano spontaneamente in ospedale, cliniche chirurgiche e ambienti preospedalieri. Il sistema Flow-Safe II Plus è un ausilio respiratorio da utilizzare con una maschera o un dispositivo avanzato per le vie respiratorie e con un erogatore di gas per innalzare la pressione polmonare del paziente. Il livello della pressione fornita al sistema può essere impostato perché aumenti durante l'inspirazione e diminuisca durante l'espiazione.</p>	
CARATTERISTICHE	<p>Il sistema Flow-Safe II Plus permette di spostarsi dalla modalità CPAP alla modalità Bilevel in modo molto semplice. Mediante la regolazione del flusso si regola la pressione C_{pac} e quella IPAP. In modalità Bilevel la ghiera laterale EPAP (Pressione Positiva Espiratoria) permette all'operatore di regolare la pressione EPAP. Il manometro incorporato permette di verificare la lettura della pressione CPAP o IPAP/EPAP (in modalità Bilevel), mentre la valvola di sicurezza limita la pressione a 25cm H₂O onde evitare aumenti non intenzionali della pressione. Il sistema Flow-Safe II Plus riduce il consumo di ossigeno del 50% (rispetto a modelli che necessitano dei 30litri/minuto) utilizzando flussometri standard e garantisce un adeguato livello di erogazione di FiO₂. I 15 litri/minuto forniscono oltre 10cm H₂O di pressione CPAP e IPAP. È possibile aggiungere il nebulizzatore in linea per la somministrazione di medicinali e senza la necessità di rimuovere la maschera. Il Flow-Safe II Plus è fornito di Flow-Safe II con maschera deluxe profilata (policarbonato e silicone) e anatomica ad alta tenuta che non causa eccessiva pressione, è leggera e maneggevole. Chiusura in velcro, supporto frontale e sistema di regolazione in altezza, clip di connessione/disconnessione rapida alla maschera. Maschera e tubo per ossigeno in PVC. Clip di connessione, <u>manometro e valvola</u> di sicurezza in policarbonato. Fissaggio per la testa in poliestere, PVC e policarbonato. LATEX FREE</p>	
CONFEZIONE	5 per confezione, in busta singola, monouso	
MARCHIO CE, CLASSE IIa CND: R03010102 REPERTORIO:1751309/R		
STERILIZZAZIONE	TIPO /DURATA	NON STERILE
IN.CAS. SRL VIA STAFFALI, 40/A – 37062 DOSSOBUONO (VR) e-mail: info@incasmed.com T. 045 601267		